

肠内营养泵快速操作指南



警告



- 使用肠内营养泵前，请仔细阅读《产品说明书》。
- 出现声光报警时，请仔细查看屏幕上的报警信息，并做相应处理。
- 请使用与本产品配套的营养袋。
- 液体泼洒到营养泵上，请立即停止使用。经维护并检测合格后才能继续运行。
- 请勿使用酒精或有机溶剂清洁本产品。

肠内营养泵使用步骤

1. 长按营养泵操作面板按钮  开机或者关机。
2. 打开透明盖，安装营养袋。（警告：请确保使用的营养袋与本产品配套。）
3. 在操作面板上设置需要的喂养参数。
4. 按“预灌注”，选择“自动灌注”进行排气操作。（警告：排气时请断开与病人的连接。）
5. 点击“运行”，开始喂养；点击“暂停”，可暂时停止喂养。

营养袋安装方法

1. 打开透明盖。
2. 将滴斗从上到下穿过卡口到底部支撑位置；将硅胶软管绕过转子。
3. 将磁环接头装入卡槽处。
4. 此时检查屏幕，应有运行选项。
5. 使用加热器时，将营养袋管路嵌入加热器凹槽中；再将加热器接头连接到泵背面的USB接口上。
6. 关闭透明盖。

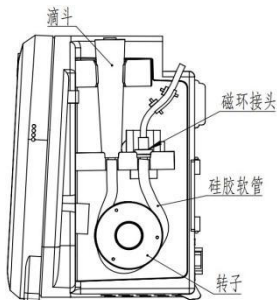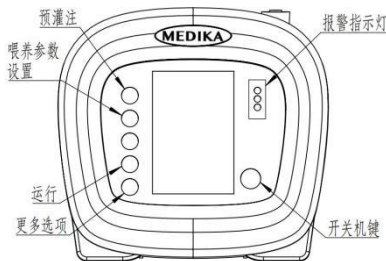

报警及排除方法

报警显示	报警等级	报警原因	排除方法
等待错误	低	非运行状态下，超过 10 分钟未对泵进行任何操作	返回，做任意操作
电池电量低	低	电池供电时间小于 30 分钟	连接 AC 电源
8020	高	电池电量即将耗尽	连接 AC 电源
喂养错误	高	喂养袋内液体用尽或者喂养袋内液体未流入管路	检查袋内是否还有液体；检查滴斗内外壁是否沾染营养液或其他异物；检查管路下端是否堵塞
喂养完成	高	设置的喂养目标完成	按下“返回”
营养袋脱落错误	高	喂养过程中，营养袋管路与泵脱离	关机重启，重新安装管路
8002	高	未检测到电机码盘信号	重启，若报警未排除，则退回工厂维修
其他系统错误	高		重启，若报警未排除，则退回工厂维修

浙江美加华医疗技术有限公司

地址：浙江省衢州市芳桂中路 19 号 6 幢 2 号

联系方式：0570-8016567